

Modalités de recueil

- Il est nécessaire de ne pas avoir pris de boisson, d'aliment, ni fumé de cigarette/e-cigarette, ni effectué de brossage de dents ou de rinçage bucco-dentaire au moins 30 minutes avant le prélèvement.
- Saliver pendant 30 secondes dans la bouche pour générer un volume suffisant de liquide salivaire, sans effort de toux ni raclement de gorge.
- Cracher la salive dans le flacon à disposition.
- Renouveler l'opération 2 fois (soit 3 fois au total).
- Fermer le flacon.
- Nettoyer l'extérieur du flacon avec la lingette fournie.
- Identifier le flacon avec votre nom / prénom / date de naissance.
- Déposer le flacon dans un premier sachet, fermer ce sachet.
- Déposer ce sachet dans le second sachet, fermer ce sachet.
- Compléter **LISIBLEMENT** la fiche de renseignements (au verso) et la joindre dans la poche extérieure du second sachet.
- Conserver ce prélèvement à température ambiante.